



1/ POSE DE L'APPAREIL AU POIGNET

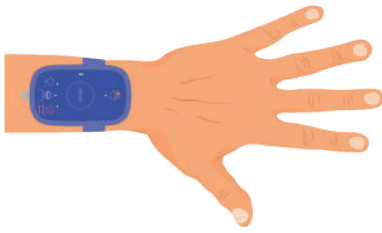


1- Placer le polygraphe sur le poignet du patient.

2/ INSTALLATION DU CAPTEUR PNEAVOX

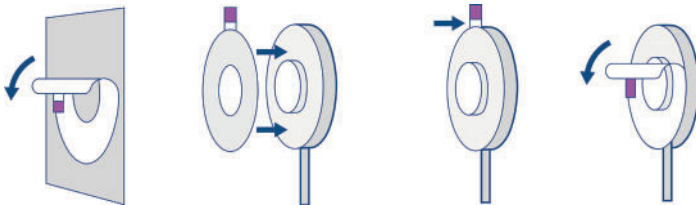

1- Placer le capteur sur la gorge, juste au dessus du creux-sus-sternal en orientant le câble vers le bras sur lequel est posé le polygraphe.

2- Retirer la rondelle de protection.

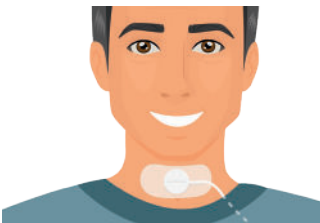

4- Recouvrir le capteur d'une bande adhésive..



3- Décoller la rondelle adhésive de son support et la coller sur le capteur.



5- Faire passer le câble du capteur dans la manche du patient, puis brancher le câble au dispositif.

3/ INSTALLATION DE LA LUNETTE NASALE ET DU THERMOCOUPLE



1- Insérer l'embout de la lunette dans les narines.

2- Faire passer le tube derrière les oreilles.

3- Ajuster à l'aide de la bague mobile.




6- Brancher la lunette à l'appareil : insérer le connecteur puis tourner d'un demi-tour vers la droite pour bloquer la lunette.




4- Maintenir la lunette nasale sur les pommettes en utilisant un rubant adhésif.

5- Faire passer le tuyau dans la manche du patient.

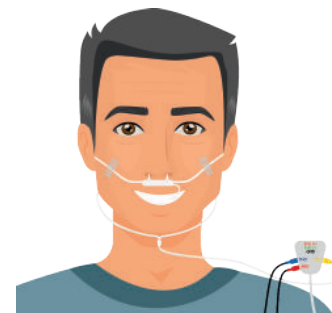


7- Brancher le connecteur du thermocouple au boîtier du cordon de liaison.

4/ INSTALLATION DES SANGLES THORACO-ABDOMINALES

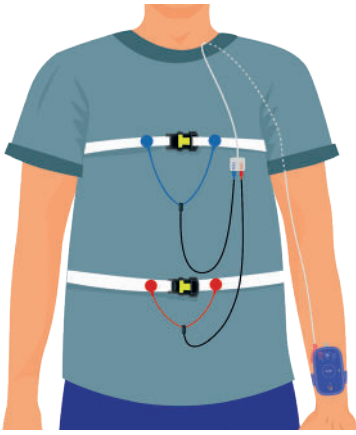

- 1- Placer une sangle autour du thorax (sous les aisselles) et l'autre autour de l'abdomen (au niveau du nombril).
- 2- Les sangles doivent être suffisamment serrées pour suivre les mouvements respiratoires du patient sans le gêner.
- 3- Connecter les câbles d'extension au boîtier du cordon de liaison.
- 4- Connecter ensuite les boutons-pression des deux câbles d'extension à leur sangle respective.

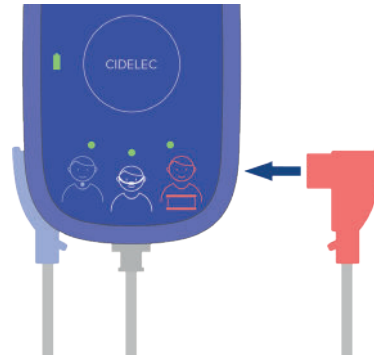

- 5- Faire passer le cordon dans la manche du patient puis le brancher au polygraphe.

5/ INSTALLATION DU CAPTEUR OXYMETRE



- 1- Placer le capteur sur le doigt. Préférer l'annulaire ou l'index.
- 2- Maintenir le fil du capteur sur le dos de la main à l'aide d'un morceau d'adhésif.



- 3- Brancher la câble à l'appareil.